

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Катетери Фолея стерильні торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Розкриття індивідуальної упаковки здійснюється безпосередньо перед використанням медичного виробу.
3. Медичний виріб використовується виключно медичним персоналом відповідної кваліфікації у стерильних та клінічних стерильних умовах.
4. Перед використанням обробити кінець медичного виробу, що вводиться, мастилом на водній основі, а отвір сечовивідного каналу - розчином фурациліну.
5. Опустивши вільний кінець медичного виробу в ємність для збору сечі або під'єднавши до сечоприймача, ввести медичний виріб в отвір сечовивідного каналу до появи сечі.
6. Роздути фіксуючий балон медичного виробу до відповідного об'єму за допомогою шприцу з використанням дистильованої води або фізіологічного розчину.
7. По закінченню виведення сечі за допомогою шприцу видалити дистильовану воду або фізіологічний розчин з фіксуючого балону медичного виробу, вилучити медичний виріб з отвору сечовивідного каналу.
8. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
9. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки та/або після контакту з нестерильною поверхнею. Матеріали медичного виробу можуть викликати алергічну реакцію.
10. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
11. Розкрита упаковка, використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

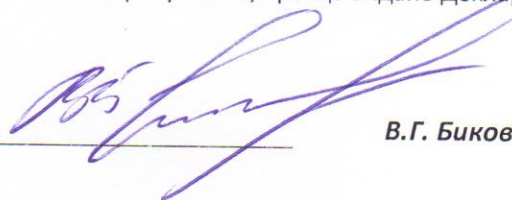
Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Катетер Фолея стерильний торгової марки IGAR двоходовий, розмір 8Fr
Катетер Фолея стерильний торгової марки IGAR двоходовий, розмір 10Fr
Катетер Фолея стерильний торгової марки IGAR двоходовий, розмір 12Fr
Катетер Фолея стерильний торгової марки IGAR двоходовий, розмір 14Fr
Катетер Фолея стерильний торгової марки IGAR двоходовий, розмір 16Fr
Катетер Фолея стерильний торгової марки IGAR двоходовий, розмір 18Fr
Катетер Фолея стерильний торгової марки IGAR двоходовий, розмір 20Fr
Катетер Фолея стерильний торгової марки IGAR двоходовий, розмір 22Fr
Катетер Фолея стерильний торгової марки IGAR двоходовий, розмір 24Fr
Катетер Фолея стерильний торгової марки IGAR двоходовий, розмір 26Fr



Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва **Nantong Angel Medical Instruments Co., Ltd.,**
(Виробничі потужності) Fusheng Road, Xiayuan Town, 226543 Nantong, People's Republic of China

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

В.Г. Биков