

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Катетери для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Розкриття індивідуальної упаковки здійснюється безпосередньо перед використанням медичного виробу.
3. Медичний виріб використовується виключно медичним персоналом відповідної кваліфікації у стерильних та клінічних стерильних умовах.
4. Перед використанням медичного виробу накласти венозний джгут вище відповідної зони пункції та обробити місце уколу асептичними засобами.
5. Ввести голку медичного виробу, зріз якої має бути направлений вгору, в вену під кутом 30° до відчуття "провалу", змінити кут положення голки до 5°, просунути голку в вену на глибину до 1см. Поява крові свідчить про знаходження голки в вені.
6. Знявши джгут, зафіксувати медичний виріб за допомогою медичного пластиру. Під'єднавши медичний виріб до шприцу, провести вливання.
7. По закінченню вливання видалити голку, обробити місце пункції асептичними засобами.
8. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
9. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки та/або після контакту з нестерильною поверхнею.
10. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
11. Розкрита упаковка, використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Катетер для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, розмір 18G
Катетер для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, розмір 19G
Катетер для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, розмір 20G
Катетер для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, розмір 21G
Катетер для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, розмір 22G
Катетер для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, розмір 23G
Катетер для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, розмір 24G
Катетер для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, розмір 25G
Катетер для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, розмір 26G
Катетер для ін'єкцій типу метелик торгової марки IGAR, розмір 27G



UA.TR.067

Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
 місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
 телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва **Shandong Zibo Shanchuan Medical Instrument Co., Ltd.,**
 (Виробничі потужності) №88 Shanchuan Road, Zichuan, 255100, Zibo City, Shandong, China

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.



(Handwritten signature)
В.Г. Биков