

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ  
**Пластирі медичні RiverPlast торгової марки "IGAR" перцеві перфоровані**

1. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Перед використанням очистити та висушити поверхню місця накладення медичного виробу.
3. Розкривши безпосередньо перед використанням індивідуальну упаковку, зняти захисне покриття, накласти медичний виріб, притиснувши до поверхні місця накладання.
4. Не накладати медичний виріб на відкриті рани та пошкоджені ділянки шкіри.
5. Уникати контакту з очима та слизовою оболонкою. Після використання медичного виробу очистити та висушити руки.
6. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
7. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.

*Протипоказання:* індивідуальна чутливість шкіри. Не використовувати в разі виникнення подразнення та опіків.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" перцевий перфорований 7 x 10 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" перцевий перфорований 10 x 15 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" перцевий перфорований 10 x 18 см
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" перцевий перфорований 12 x 18 см



Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "IGAR"**  
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,  
телефон/факс: +380445853455

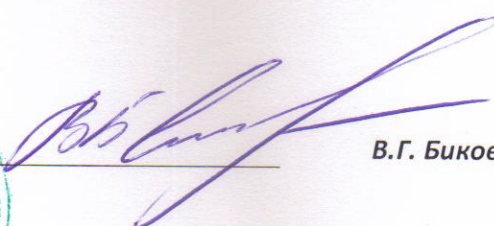
Місце виробництва **Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.,**  
(Виробничі потужності) Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор



М.П.

  
В.Г. Биков

Сторінка 1 з 1