

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

**Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні RIVERGLOVES торгової марки IGAR**

1. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Перед використанням медичного виробу очистити та висушити руки.
3. Розкрити безпосередньо перед використанням індивідуальну упаковку, перевірити на цілісність та надягти на руку медичний виріб, враховуючи відповідність розміру, зазначеного на упаковці.
4. Після надягання на руку видалити залишки пудри з поверхні медичного виробу стерильними засобами.
5. Медичний виріб використовується виключно медичним персоналом відповідної кваліфікації у стерильних та стерильних клінічних умовах.
6. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
7. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки та/або після контакту з нестерильною поверхнею.
8. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
9. Не використовувати медичний виріб протягом більш ніж двох годин поспіль, компоненти медичного виробу можуть викликати алергічну реакцію у деяких користувачів.
10. Розкрита упаковка, використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні RIVERGLOVES торгової марки IGAR, розмір 6
Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні RIVERGLOVES торгової марки IGAR, розмір 6.5
Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні RIVERGLOVES торгової марки IGAR, розмір 7
Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні RIVERGLOVES торгової марки IGAR, розмір 7.5
Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні RIVERGLOVES торгової марки IGAR, розмір 8
Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні RIVERGLOVES торгової марки IGAR, розмір 8.5
Рукавички медичні латексні хірургічні припудрені стерильні RIVERGLOVES торгової марки IGAR, розмір 9




UA.TR.067

Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**  
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,  
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва **Anhui Haojie Plastic & Rubber Products Co., Ltd.**  
(Виробничі потужності) № 170 Daqing Road, 233010 Bengbu, Anhui, China

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

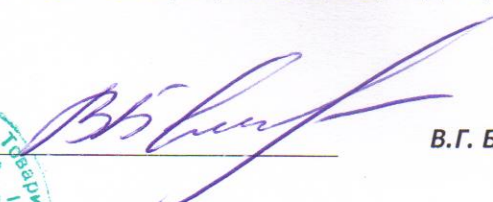

**В.Г. Биков**