

Інструкція щодо використання

Найменування продукції: **Бинт гіпсовий «ІГАР»**

Бинт гіпсовий «ІГАР» 5x270
Бинт гіпсовий «ІГАР» 7,5x270
Бинт гіпсовий «ІГАР» 10x270
Бинт гіпсовий «ІГАР» 12,5x270
Бинт гіпсовий «ІГАР» 15x270
Бинт гіпсовий «ІГАР» 20x270
Бинт гіпсовий «ІГАР» 5x300
Бинт гіпсовий «ІГАР» 7,5x300
Бинт гіпсовий «ІГАР» 10x300
Бинт гіпсовий «ІГАР» 12,5x300
Бинт гіпсовий «ІГАР» 15x300
Бинт гіпсовий «ІГАР» 20x300
Бинт гіпсовий «ІГАР» 5x460
Бинт гіпсовий «ІГАР» 7,5x460
Бинт гіпсовий «ІГАР» 10x460
Бинт гіпсовий «ІГАР» 12,5x460
Бинт гіпсовий «ІГАР» 15x460
Бинт гіпсовий «ІГАР» 20x460

Сфера застосування: фіксація всіх типів переломів кісток, ортопедична пластика, надання першої допомоги, фіксація при хірургічних втручаннях.

Показання:

1. Відкрити вздовж шва герметичний пакет.
2. Ізолювати шкіру пацієнта від гіпсового бинта за допомогою медичної бавовняної прокладки або ортопедичної прокладки.
3. Витягнути рулон гіпсового бинту з упакування та занурити у воду при температурі 20±2°C на 30 секунд.
4. Застосовуйте гіпсовий бинт у відповідності із загальноприйнятим методом.

Увага!

1. Використовувати тільки якщо упакування неушкоджене та герметичне.
2. Тільки для одноразового використання.
3. Зберігати в сухому прохолодному місці, уникати підвищеної температури (40C).
4. Необхідно захищати від прямих сонячних променів, УФ випромінювання та вологи.
5. Оскільки гіпсові бинти високо гігроскопічні, рекомендовано розпаковувати їх безпосередньо перед використанням.

Директор



Биков В.Г.