



Найменування продукції:

Рукавички медичні латексні оглядові стерильні IGAR (розміри S, M, L, XL)
Виробник: Shandong Yuyuan Latex Gloves Co., Ltd., Китай

Специфікація
Рукавички медичні латексні оглядові стерильні IGAR, розмір S
Рукавички медичні латексні оглядові стерильні IGAR, розмір M
Рукавички медичні латексні оглядові стерильні IGAR, розмір L
Рукавички медичні латексні оглядові стерильні IGAR, розмір XL

Сфера використання:

1. В операційних приміщеннях: рукавички медичні стерильні діють як захисний бар'єр між медичним персоналом та пацієнтом, запобігають поширенню інфекції та захворювань.
2. В медицині та стоматології: рукавички надягає на руки медичний та пов'язаний з медициною персонал під час огляду пацієнтів для запобігання зараження пацієнтів та медичного персоналу.

Інструкція з використання:

1. Перед використанням помити руки теплою водою та милом. Руки повинні бути сухими.
2. Розірвати герметичний пакет по шву.
3. Вийняти рукавички з обгортки. Перед використанням перевірити рукавички на цілісність.
4. Надягти стерильні рукавички. Після надягання витерти залишки пудри з рукавичок стерильною вологою серветкою.

Увага!

1. Зберігати на відстані від джерел займання, у холодному сухому місці при температурі не вище 40°C.
2. Захищати від прямих сонячних променів та дії озону.
3. Цей продукт містить натуральний латекс, який може викликати алергічну реакцію у деяких користувачів. Інші компоненти (пудра), використані у виробництві рукавичок, також можуть викликати алергію.

Директор заводу: Ру Ліу

/Підпис/

Штамп заводу:

Шандонг Ююань Латекс Главз Ко., Лтд.
(Shandong Yuyuan Latex Gloves Co., Ltd.)