



**Інструкція з
використання
Набори
гінекологічні
одноразові оглядові
торгової марки
«IGAR»**

1.	Дзеркало вагінальне стерильне одноразове торгової марки "IGAR" (розмір S)
2.	Дзеркало вагінальне стерильне одноразове торгової марки "IGAR" (розмір M)
3.	Дзеркало вагінальне стерильне одноразове торгової марки "IGAR" (розмір L)
4.	Шпатель гінекологічний одноразовий стерильний торгової марки "IGAR" тип Ейра
5.	Шпатель гінекологічний одноразовий стерильний торгової марки "IGAR" тип Фолькмана
6.	Щіточка цервікальна одноразова стерильна торгової марки "IGAR"
7.	Щіточка цитологічна одноразова стерильна торгової марки "IGAR"
8.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки "IGAR" №1 у складі: дзеркало вагінальне – 1 шт.; щіточка цервікальна – 1 шт.; аплікатор ватний -1 шт. ; шпатель гінекологічний Ейра – 1 шт.; рукавичка оглядова - 2 шт.; скло предметне - 2 шт.; пелюшка – 1 шт.; бахіли медичні – 1 пара.
9.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки "IGAR" №2 у складі: дзеркало вагінальне – 1 шт.; щіточка цервікальна – 1 шт.; аплікатор ватний – 1 шт.; шпатель гінекологічний Фолькмана – 1 шт. ; рукавичка оглядова - 2 шт.; скло предметне – 2 шт., ; пелюшка – 1 шт. ; бахіли медичні – 1 пара.
10.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки "IGAR" №3 у складі: дзеркало вагінальне – 1 шт.; щіточка гінекологічна цервікальна – 1 шт.; рукавичка оглядова - 2 шт.; пелюшка – 1 шт., ; бахіли медичні – 1 пара.
11.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки "IGAR" №4 у складі: дзеркало вагінальне – 1 шт.; шпатель гінекологічний Ейра – 1 шт.; рукавичка оглядова - 2 шт.; пелюшка – 1 шт.; бахіли медичні – 1 пара .
12.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки "IGAR" №5 у складі: дзеркало вагінальне – 1 шт.; рукавичка оглядова - 2 шт.; пелюшка – 1 шт.; бахіли медичні – 1 пара .
13.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки "IGAR" №6 у складі: рукавичка оглядова - 2 шт.;

	пелюшка – 1 шт.
14.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки “IGAR” №7 у складі: рукавичка оглядова - 2 шт.; пелюшка – 1 шт.; бахіли медичні – 1 пара.
15.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки “IGAR” №8 у складі: щіточка цервікальна – 1 шт.; рукавичка оглядова - 2 шт.; пелюшка – 1 шт.
16.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки “IGAR” №9 у складі: щіточка цервікальна – 1 шт.; шпатель гінекологічний Ейра – 1 шт.
17.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки “IGAR” №10 у складі: щіточка цервікальна – 1 шт.; рукавичка оглядова - 2 шт.; пелюшка – 1 шт.; скло предметне – 2 шт.; бахіли медичні – 1 пара.
18.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки “IGAR” №11 у складі: щіточка гінекологічна цервікальна – 1 шт.; шпатель гінекологічний Ейра – 1 шт.; аплікатор ватний – 1 шт.
19.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки “IGAR” №12 у складі: дзеркало вагінальне – 1 шт.; пелюшка – 1 шт.; бахіли медичні – 1 пара.
20.	Набір гінекологічний оглядовий одноразовий стерильний торгової марки “IGAR” №13 для трансвагінального УЗД у складі: презерватив для УЗД - 1 шт.; рукавичка оглядова - 2 шт.; пелюшка – 3 шт.; бахіли медичні - 1 пара .

Для оглядових гінекологічних наборів:

1. Перевірте цілісність індивідуального упакування та термін придатності. Не використовуйте, якщо упакування пошкоджене.
2. Відкрийте герметичну упаковку. Намагайтеся не торкатися вмісту пакету.
3. Під час виймання стерильного вмісту із захисного упакування дотримуйтеся асептичної методики (використовуйте стерильні інструменти).
4. Лікар має добре володіти техніками та методиками гінекологічного огляду та взяття зразків.
5. Тільки для одноразового використання. Не використовуйте повторно. Повторна стерилізація не дозволяється!
6. Необхідно уникати підвищеної температури та дії ультрафіолетового випромінювання під час зберігання.
7. Утилізацію використаних продуктів проводить згідно з вимогами національних стандартів.