



Найменування продукції:

Катетер внутрішньовенний торгової марки «ІГАР»

Катетер внутрішньовенний торгової марки «ІГАР», розмір 14G
Катетер внутрішньовенний торгової марки «ІГАР», розмір 16G
Катетер внутрішньовенний торгової марки «ІГАР», розмір 18G
Катетер внутрішньовенний торгової марки «ІГАР», розмір 20G
Катетер внутрішньовенний торгової марки «ІГАР», розмір 22G
Катетер внутрішньовенний торгової марки «ІГАР», розмір 24G

Призначення: введення медичних препаратів пацієнтам, коли неможливе їх оральне застосування або у випадку термінового та введення та точного дозування в ефективній концентрації (особливо якщо медичний препарат може змінити свої властивості при пероральному застосуванні); моніторинг кров'яного тиску, взяття зразків крові для дослідження; парентеральне годування (окрім сумішей, які містять ліпіди); регідратація організму.

Інструкція по застосуванню:

1. Розташуйте голку катетеру по центру вени.
2. Ретельно прижати вену та відтягнути шкіру вниз.
3. Швидко введіть голку.
4. При появі ознак крові в катетері, зменшити кут нахилу камери, опустіть катетер на шкіру, введіть катетер в вену до половини.
5. Видаліть внутрішню голку, приєднати систему переливання розчинів та повністю відкрити.
6. Введіть катетер повністю до втулки щоб зменшити ризик інфікування.
7. Після використання утилізувати згідно з діючими нормами та стандартами.
8. Зберігати в прохолодному, сухому місці, уникати надмірного тепла (40C).
9. Захищати від прямого сонячного світла та ультрафіолетового випромінювання та вологи.

Увага:

1. Стерилізовано газом оксиду етилену.
2. Стерильне якщо упаковку не ушкоджено та не відкрито.
3. Для одноразового застосування.
4. Для застосування в умовах клініки.

З повагою

Жанг лей лей – директор заводу

Завод: Венжоу Хуалі Медікал Інструмент Ко., Лтд. (Wenzhou Huali Medical Instrument Co., Ltd)