



Найменування продукту:

Катетер Нелатона торгової марки «IGAR»

Специфікація
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr6 чоловічий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr8 чоловічий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr10 чоловічий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr12 чоловічий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr14 чоловічий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr16 чоловічий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr18 чоловічий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr20 чоловічий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr22 чоловічий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr24 чоловічий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr6 жіночий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr8 жіночий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr10 жіночий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr12 жіночий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr14 жіночий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr16 жіночий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr18 жіночий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr20 жіночий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr22 жіночий
Катетер Нелатона торгової марки «IGAR» Fr24 жіночий

Інструкція по застосуванню:

1. Перевірте цілісність індивідуального упакування та термін придатності. Не використовуйте якщо упакування було відкрите або пошкоджене.
2. Відкрити герметичне упакування, дістати стерильний катетер з захисного пакету.
3. При необхідності використовуйте медичні лубриканти під час катетеризації. Використовуйте асептичну техніку катетеризації.
4. Обережно введіть катетер в уретру та просувайте вздовж уретри поки не досягнете сечового міхура.
5. Після повного спорожнення сечового міхура обережно витягніть катетер.
6. Не підлягає повторної стерилізації.
7. Захищати від надмірного нагрівання, прямого сонячного світла та ультрафіолетового випромінювання та вологи.
8. Після використання утилізувати згідно з діючими нормами та стандартами.

З повагою

Генеральний директор – Вань Юн
Завод: Нанжинь Хонь Ан Медікал Аплікейшн Ко., Лтд. (Nanjing Hong An Medical Application Co.,Ltd)