



Найменування продукту:

Канюля внутрішньовенна (УНОФЛОН бренд)

Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН, розмір 14G
Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН, розмір 16G
Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН, розмір 18G
Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН, розмір 20G
Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН, розмір 22G
Катетер внутрішньовенний УНОФЛОН, розмір 24G

Призначення:

введення медичних препаратів пацієнтам, коли неможливе їх оральне застосування або у випадку термінового та введення та точного дозування в ефективній концентрації (особливо якщо медичний препарат може змінити свої властивості при пероральному застосуванні); моніторинг кров'яного тиску, взяття зразків крові для дослідження; парентеральне годування (окрім сумішей, які містять ліпіди); регідрація організму.

Інструкція по застосуванню:

1. Розташуйте голку катетеру по центру вени.
2. Ретельно прижати вену та відтягнути шкіру вниз.
3. Швидко введіть голку.
4. При появі ознак крові в катетері, зменшить кут нахилу камери, опустіть катетер на шкіру, введіть катетер в вену до половини.
5. Видаліть внутрішню голку, приєднати систему переливання розчинів та повністю відкрити.
6. Введіть катетер повністю до втулки щоб зменшити ризик інфікування.
7. Після використання утилізувати згідно з діючими нормами та стандартами.
8. Зберігати в прохолодному, сухому місці, уникати надмірного тепла (40C).
9. Захищати від прямого сонячного світла та ультрафіолетового випромінювання та вологи.

Увага:

1. Стерилізовано газом оксиду етилену
2. Стерильно, якщо упаковку не ушкоджено та не відкрито.
3. Для одноразового застосування.
4. Для застосування в умовах клініки.

З повагою

Від Харсорія Хелскеар Пвт. Лтд.
(Harsoria Healthcare Pvt. Ltd.)

Несраж Гупта

Генеральний директор

Печатка: (Харсорія Хелскеар Пвт. Лтд. (Harsoria Healthcare Pvt. Ltd.))