



Найменування продукції:

Контейнери для забору біологічних рідин торгової марки “IGAR” стерильні та нестерильні

Контейнери для забору калу торгової марки “IGAR” 60 мл стерильні
Контейнери для забору калу торгової марки “IGAR” 40 мл стерильні
Контейнери для забору калу торгової марки “IGAR” 30 мл стерильні
Контейнери для забору калу торгової марки “IGAR” 60 мл нестерильні
Контейнери для забору калу торгової марки “IGAR” 40 мл нестерильні
Контейнери для забору калу торгової марки “IGAR” 30 мл нестерильні

Інструкція з використання:

1. Перевірте цілісність індивідуального упакування та термін придатності. Не використовуйте, якщо упакування пошкоджене.
2. Використовуйте одноразові рукавички під час забору зразків.
3. Відкрийте герметичну упаковку, дістаньте контейнер з упаковки.
4. Зніміть кришку контейнеру.
5. Не торкайтеся внутрішніх поверхонь контейнера, кришки або «ложечки».
6. Пацієнту необхідно провести дефекацію в клінічно чистий приймач. За допомогою «ложечки» зберіть достатню кількість калу та заповніть контейнер приблизно на одну третину. Необхідно запобігти забруднення зразку сечею.
7. Ретельно закрийте кришку контейнеру, щоб запобігти протіканню та захистити зразок від забруднення.
8. Вкажіть ім'я та ідентифікаційні дані пацієнта, час та дату забору зразку на етикетці. Перевірте, що інформація на етикетці відповідає вмісту. Якщо контейнер використовується для перевезення, етикетку необхідно розміщувати на контейнері, а не на кришці.
9. Утилізацію використаних контейнерів проводить згідно з вимогами національних стандартів.
10. Не використовуйте повторно. Тільки для одноразового використання.
11. Зберігати при температурі від 5С до 40С та відносній вологості повітря не більш ніж 80%.

З повагою

Директор заводу: Ху Яксіань

Завод: Хаймен Чаньлонь Інструмент Ко., Лтд. (Haimen Changlong Instrument Co., Ltd)