

**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ**  
**Бинт гіпсовий торгової марки IGAR**

1. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Розкрити упаковку, дістати медичний виріб, занурити у воду при температурі  $20 \pm 2^\circ\text{C}$  на 30 секунд, застосувати у відповідності із загальноприйнятим методом.
3. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
4. Не накладати медичний виріб на відкриті рани.
5. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 5×270 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 7,5×270 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 10×270 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 12,5×270 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 15×270 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 20×270 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 5×300 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 7,5×300 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 10×300 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 12,5×300 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 15×300 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 20×300 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 5×460 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 7,5×460 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 10×460 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 12,5×460 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 15×460 см
Бинт гіпсовий торгової марки IGAR, 20×460 см



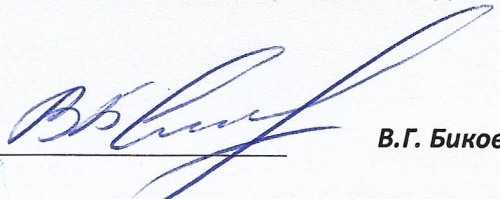
**Виробник** Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"  
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,  
телефон/факс: +380445853455

**Місце виробництва** (Виробничі потужності) **Anji Wande Medical Products Co., Ltd.,**  
Shangshu Industrial Zone, Anji County, Zhejiang, 313300, China

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

**Директор**

М.П.

**В.Г. Биков**

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 16.01.2018

Сторінка 1 з 1