

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Скарифікатор сталевий стерильний торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Обравши місце пункції, розігріти та обробити його 70% ізопропіловим спиртом, дати йому висохнути.
3. Розкриття індивідуальної упаковки медичного виробу здійснювати безпосередньо перед його використанням.
4. Зробити пункцію за допомогою медичного виробу.

Увага!

1. Утилізувати відповідно до вимог національних стандартів.
2. Зберігати у чистому сухому та темному місці.
3. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
4. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження індивідуальної упаковки та/або після контакту з нестерильною поверхнею.
5. Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою

Скарифікатор сталевий стерильний торгової марки IGAR



UA.TR.101

Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва (Виробничі потужності) **Хуайань Тіанда Медікал Інструментс Ко., Лтд.,**
(Huaian Tianda Medical Instruments Co., Ltd.,)
No 106, Іст Сунцзян Роуд, Хувін Економік енд Технолоджікал
Девелопмент Зоун, 223002, Хуайань Сіті, Цзянсу, Китай
(No 106, East Songjiang Road, Huaiyin Economic & Technological
Development Zone, 223002, Huaian City, Jiangsu, China)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор



В.Г. Биков

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 08.11.2018 року

Сторінка 1 з 1