



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Маска медична неткана торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити цілісність упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Діставши з упаковки, прикласти медичний виріб внутрішньою поверхнею світлого кольору до нижньої частини обличчя.
3. Зафіксувавши медичний виріб на обличчі за допомогою еластичних завушних петель, змоделювати горизонтальну гнучку пластину у верхній частині медичного виробу для щільного прилягання по формі носу та обличчя.
4. Розправити горизонтальні складки медичного виробу для формування відповідного повітряного карману.
5. Не використовувати медичний виріб протягом більш ніж двох годин поспіль.
6. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
7. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
8. Розкрита упаковка, використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою

Маска медична неткана торгової марки IGAR




Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва **Xiantao Xingrong Protective Products Co., Ltd.,**
(Виробничі потужності) № 46, East of Pengchang Road, 433018 Xiantao, Hubei, China

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор

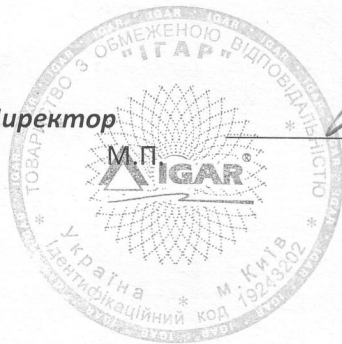

В.Г. Биков
В.Г. Биков

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 21.06.2019

Сторінка 1 з 1