



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Заглушка Луер торгової марки IGAR (стерильна)

1. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Розкриття індивідуальної упаковки здійснюється безпосередньо перед використанням медичного виробу.
3. Медичний виріб використовується виключно медичним персоналом відповідної кваліфікації у стерильних та стерильних клінічних умовах.
4. Тримайте медичний виріб за циліндричну ребристу поверхню для гарного захвату.
5. Вставте виріб у з'єднувальний порт та прокрутіть за годинниковою стрілкою, щоб закріпити його на місці.
6. Для видалення медичного виробу, прокрутіть його проти годинникової стрілки
7. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
8. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки та/або після контакту з нестерильною поверхнею.
9. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
10. Розкрита упаковка, використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Заглушка Луер торгової марки IGAR (стерильна)



Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455
Харсорія Челскеар Пвт. Лтд.,
(Harsoria Healthcare Pvt. Ltd.,)
Місце виробництва (Виробничі потужності) 110-111, Фейз-ІV, Удьог Віхар, Гургаон, Харьяна-122 015, Індія
(110-111, Phase-IV, Udyog Vihar, Gurgaon, Haryana-122 015, India)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор



В.Г. Биков

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 27.12.2018

Сторінка 1 з 1