



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Термометр медичний максимальний скляний торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити цілісність колби і капілярної трубки всередині колби медичного виробу.
2. Перед використанням медичного виробу, взявши його за верхній кінець, струснути його рукою декілька разів до тих пір, поки стовпчик ртуті не буде нижче відмітки 35,5 °С.
3. Встановити медичний виріб резервуаром, що знаходиться в його нижньому кінці, в центр пахвової западини та притиснути рукою для його фіксації, уникаючи при цьому надмірного тиску на медичний виріб.
4. Витримавши медичний виріб не менше 5 хвилин, видалити медичний виріб та відрахувати температуру за шкалою.
5. Транспортувати та зберігати у недоступному для дітей місці, уникати високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
6. Гарантійний термін зберігання та експлуатації медичного виробу становить 18 місяців з дня виготовлення при дотриманні умов експлуатації, збереження та транспортування.
7. Увага! У випадку роз'єднання ртуті в капілярній трубці всередині колби медичного виробу помістити медичний виріб не більше ніж на 10 хвилин у теплу воду з температурою не вище 40 °С. Дане явище не являється дефектом медичного виробу та може виникнути внаслідок його транспортування.
8. Увага! Медичний виріб містить ртуть! Використовувати медичний виріб з обережністю: не кидати, не перегрівати! У випадку порушення цілісності колби та/або капілярної трубки всередині колби медичного виробу до моменту передачі в організацію, що здійснює збір та утилізацію таких відходів, зберігати медичний виріб в закритій посудині з водою.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою

Термометр медичний максимальний скляний торгової марки IGAR




Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "IGAR"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна,
01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце **Wuxi HongGuang Medical Equipment Co., Ltd.,**
виробництва № 21, Xixin Road, Xibei Town, Wuxi City, Jiangsu, 214194, China
(Виробничі
потужності)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, та Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "13" січня 2016 р. №94

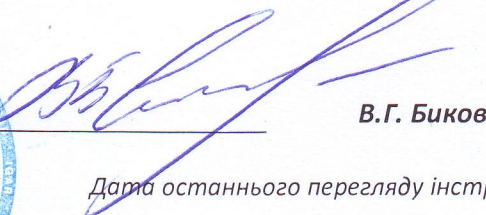


В.Г. Биков

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 04.01.2019

Сторінка 1 з 1