



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Підгузки для дорослих торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити цілісність упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Дістаньте підгузок з упаковки, розпряміть та розгладьте його. Розмістіть медичний виріб між ногами пацієнта, зберігаючи пропорційність розправленої поглинаючої поверхні спереду і ззаду, притисніть до тіла, зафіксуйте підгузок на талії, за допомогою еластичних застібок-липучок: спочатку закріпіть нижні, потім верхні.
3. Одягнувши підгузок, переконайтеся, що застібки-липучки добре закріплені, а підгузок щільно прилягає до тіла. Перевірте, що захисні бортики в паховій області не завернулися всередину та підгузок не здавлює тіло.
4. При наповненні та/або зниженні вбираючої дії медичний виріб підлягає заміні на новий.

Увага!

1. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря і прямого сонячного світла.
2. Використаний підгузок щільно скрутіть і викиньте у відро для сміття. Забороняється викидати використаний медичний виріб до каналізаційних систем.
3. Не використовуйте медичний виріб повторно, лише для одноразового застосування.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Підгузки для дорослих торгової марки IGAR, розмір S
Підгузки для дорослих торгової марки IGAR, розмір M
Підгузки для дорослих торгової марки IGAR, розмір L
Підгузки для дорослих торгової марки IGAR, розмір XL



Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455
СУЧЖОУ СУНІНГ АНДЕРПАД КО., ЛТД.,
(SUZHOU SUNING UNDERPAD CO., LTD.,)
№ 70, Йонг Ан Роад Ксугуан, Нью Дістрікт, 215151 Сучжоу, Китайська
Народна Республіка
(№ 70, Yong An Road Xuguan, New District, 215151 Suzhou, People's Republic of
China)

Місце виробництва
(Виробничі потужності)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор



В.Г. Биков
В.Г. Биков

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 05.07.2019

Сторінка 1 з 1