



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки IGAR

1. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
2. Перед використанням медичного виробу очистити та висушити руки.
3. Розкрити безпосередньо перед використанням індивідуальну упаковку, перевірити на цілісність та надягти на руку медичний виріб, враховуючи відповідність розміру, зазначеного на упаковці.
4. Після надягання на руку видалити залишки пудри з поверхні медичного виробу стерильними засобами.
5. Медичний виріб використовується виключно медичним персоналом відповідної кваліфікації у стерильних та стерильних клінічних умовах.
6. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
7. Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки та/або після контакту з нестерильною поверхнею.
8. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
9. Не використовувати медичний виріб протягом більш ніж двох годин поспіль, матеріали медичного виробу можуть викликати алергічну реакцію.
10. Повторна стерилізація медичного виробу не дозволяється.
11. Розкрита упаковка, використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

УВАГА!

Медичний виріб містить натуральний латекс та інші компоненти (пудра), що можуть викликати алергічну реакцію у деяких користувачів.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки IGAR, розмір XS (5-6)
Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки IGAR, розмір S (6-7)
Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки IGAR, розмір M (7-8)
Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки IGAR, розмір L (8-9)
Рукавички медичні латексні оглядові стерильні торгової марки IGAR, розмір XL (9-10)



UA.TR.101

Виробник	Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР" місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103, телефон/факс: +380445853455 Аньхой Хаоджі Пластик енд Раббер Продактс Ко., Лтд. (Anhui Haojie Plastic & Rubber Products Co., Ltd.) Дакін Роуд, 170, 233010 Бенгбу, Аньхой, Китай (№ 170 Daqing Road, 233010 Bengbu, Anhui, China)
Місце виробництва (Виробничі потужності)	Аньхой Анью Латекс Продактс Ко., Лтд. (Anhui Anyu Latex Products Co., Ltd.) № 95 Юхе Роад 233010 Бенбу, Аньхой, Китайська Народна Республіка (№ 95 Yuhe Road 233010 Bengbu, Anhui, People's Republic of China)
Місце виробництва (Виробничі потужності)	Тіанчанг Хеншен Медікал Дівайсез Ко., Лтд. (Tianchang Hengsheng Medical Devices Co., Ltd.) Кінлан Ідастріал Парк 239341 Тіанчанг Сіті, Аньхой Провінс, Китайська Народна Республіка (Qinlan Industrial Park 239341 Tianchang City, Anhui Province, People's Republic of China)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор

М.П.



В.Г. Биков

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 21.06.2019 року