



## ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ

### Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare нестерильні неприпудрені

1. Перед використанням перевірити термін придатності медичного виробу, очистити та висушити руки.
2. Перед використанням перевірити на цілісність та одягти на руку медичний виріб, враховуючи відповідність розміру, зазначеного на упаковці.
3. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
4. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
5. Не використовувати медичний виріб у разі його пошкодження. Рукавички виготовлено з нітрилу. Медичний виріб не містить компоненти натурального латексу та пудри, які можуть викликати алергічну реакцію у деяких користувачів.
6. Використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.
7. Цей виріб містить дітіокарбамат те меркаптобензотіазол цинку, не використовувати за підвищеної чутливості до цих речовин.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Skin <sup>2</sup> нестерильні неприпудрені розмір XS (5-6)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Skin <sup>2</sup> нестерильні неприпудрені розмір S (6-7)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Skin <sup>2</sup> нестерильні неприпудрені розмір M (7-8)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Skin <sup>2</sup> нестерильні неприпудрені розмір L (8-9)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Skin <sup>2</sup> нестерильні неприпудрені розмір XL (9-10)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Shine+ нестерильні неприпудрені розмір XS (5-6)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Shine+ нестерильні неприпудрені розмір S (6-7)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Shine+ нестерильні неприпудрені розмір M (7-8)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Shine+ нестерильні неприпудрені розмір L (8-9)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Nitrile Shine+ нестерильні неприпудрені розмір XL (9-10)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Green нестерильні неприпудрені зеленого кольору розмір XS (5-6)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Green нестерильні неприпудрені зеленого кольору розмір S (6-7)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Green нестерильні неприпудрені зеленого кольору розмір M (7-8)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Green нестерильні неприпудрені зеленого кольору розмір L (8-9)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Green нестерильні неприпудрені зеленого кольору розмір XL (9-10)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Silk нестерильні неприпудрені білого кольору розмір XS (5-6)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Silk нестерильні неприпудрені білого кольору розмір S (6-7)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Silk нестерильні неприпудрені білого кольору розмір M (7-8)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Silk нестерильні неприпудрені білого кольору розмір L (8-9)
Рукавички медичні оглядові нітрилові Sempercare Silk нестерильні неприпудрені білого кольору розмір XL (9-10)



Виробник **Semperit Investments Asia Pte Ltd**  
8 Jurong Town Hall Road, #29-03-06 The JTC Summit, Singapore 609434  
[www.sempermed.com](http://www.sempermed.com)

Місце виробництва (Виробничі потужності) **LATEXX PARTNERS BERHAD**  
Lot 18374, Jalan Perusahaan 3, Kamunting Industrial Estate, 34600 Kamunting, Taiping, Perak, Malaysia

Уповноважений представник в Україні: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР",  
код ЄДРПОУ 19243202, місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.

Директор

М.П. ІГАР

*В.Г. Биков*

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 24.02.2021

Сторінка 1 з 1