



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ
Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" мозольний

1. Перед накладанням пластиру слід розпарити стопу у теплій ванні, протягом 3-5 хв (min) та ретельно висушити.
2. Розкрити упаковку, зняти з пластиру захисну плівку.
3. Прикласти подушечкою до сухого мозоля, притиснути краї стрічки до шкіри.
4. Зняти через 12-24 години (h).
5. У разі потреби повторити процедуру в тому ж порядку ще 2-3 рази.

Увага!

1. Зберігати у сухому, чистому та темному місці.
2. Не використовувати після закінчення терміну придатності та у разі пошкодження упаковки.

Ефективний засіб для видалення сухих мозолів.

Містить саліцилову кислоту та фенол.

Протипоказання: індивідуальна чутливість, порушення цілісності шкіри, захворювання шкіри.

Назва модифікації медичного виробу українською мовою

Пластир медичний RiverPlast торгової марки "IGAR" мозольний 7 x 2 см (cm)



Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "IGAR"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва **Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд.,**
(Виробничі потужності) (Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.)
Ексі Бейянь, Зуку Таун, 213144, Чангжоу Сіті, провінція Цзянсу, Китай
(Hexi Beiyang, Zouqu Town, 213144, Changzhou City, Jiangsu Province,
China)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.



В.Г. Биков

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 12.07.2021

Сторінка 1 з 1