

**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ**  
**Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR**

1. Перед використанням перевірити термін придатності медичного виробу, очистити та висушити руки.
2. Перед використанням перевірити на цілісність та одягти на руку медичний виріб, враховуючи відповідність розміру, зазначеного на упаковці.
3. Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
4. Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
5. Не використовувати медичний виріб у разі його пошкодження. Рукавички виготовлено з нітрилу. Медичний виріб не містить компоненти натурального латексу та пудри, які можуть викликати алергічну реакцію у деяких користувачів.
6. Використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

| Назва модифікації медичного виробу українською мовою  |
|---|
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, розмір XS (5-6)                    |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, розмір S (6-7)                     |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, розмір M (7-8)                     |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, розмір L (8-9)                     |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, розмір XL (9-10)                   |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору, розмір XS (5-6)   |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору, розмір S (6-7)    |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору, розмір M (7-8)    |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору, розмір L (8-9)    |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, чорного кольору, розмір XL (9-10)  |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору, розмір XS (5-6)  |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору, розмір S (6-7)   |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору, розмір M (7-8)   |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору, розмір L (8-9)   |
| Рукавички медичні нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені торгової марки IGAR, рожевого кольору, розмір XL (9-10) |



**Виробник** **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**  
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,  
телефон/факс: +380445853455

**Місце виробництва (Виробничі потужності)** **Шрі Транг Гловз (Таїланд) Паблік Компані Лімітед**  
(Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited)  
10 Сої 10, Петкасем Роуд, Хатъяй, Сонгкла 90110 Таїланд  
(10 Soi 10, Phetkasem Road, Hatyai, Songkhla 90110 Thailand)

**Місце виробництва (Виробничі потужності)** **Блю Сейл Медікал Ко., Лтд.,**  
(Blue Sail Medical Co., Ltd.,)  
№ 21 Кшінгтіан Роуд, Кілу Кемікал Вндастріал Парк, Зібо, Шандунь  
255414, Китай  
(No.21 Qingtian Road, Qilu Chemical Industrial Park, Zibo, Shandong 255414  
China)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.



*(Handwritten signature)*  
**В.Г. Биков**

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 16.11.2022 року (Редакція 2)