



ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR

Форма випуску: стерильна пов'язка в індивідуальному пакеті.

Перед застосуванням медичного виробу обов'язкова консультація з лікарем!

Опис виробу:

Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR — це стерильний медичний виріб, що складається з водонепроникної прозорої плівки (ТПУ) та шару термоплавкого клею, чутливого до тиску, який містить поглинаючий компонент — натрієву карбоксиметилцелюлозу.

При контакті з ексудатом пов'язка утворює гель, що створює вологе середовище для загоєння рани. Пов'язка є еластичною, легко адаптується до форми тіла та забезпечує герметичний бар'єр від зовнішніх забруднень, що спрощує догляд.

Показання до застосування:

Використовувати за призначенням лікаря.

Виріб призначений для широкого спектру ексудуючих ран, включаючи післяопераційні шви, донорські ділянки, пролежні на початковій стадії*, трофічних виразок, саден, порізів, подряпин; опіків першого та другого ступеня та інших неінфікованих пошкоджень шкіри з помірним або слабким ексудатом та для загоєння ран в умовах вологого середовища.

* Керівні принципи Європейської консультативної групи з пролежнів (EPUAP) та Національної консультативної групи з пролежнів (NPUAP) на основі 2019 CPG рекомендують гідроколоїди як ефективний засіб для профілактики та лікування пролежнів I-II ст.

Протипоказання:

- Інфіковані рани.
- Рани з ознаками некрозу, які потребують хірургічного втручання.
- Алергія або підвищена чутливість до компонентів виробу.
- Не застосовувати при тяжких опіках III ступеня.

Спосіб застосування

1. Виберіть правильний розмір: переконайтеся, що центральна подушечка на рані виступає на 1-2 см за краї рани.
2. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
3. Ретельно вимити та висушити шкіру навколо рани, вимити руки та використати рукавички.
4. Відкрити упаковку безпосередньо перед застосуванням.
5. Зняти захисну плівку.
6. Накласти пов'язку до рани, обережно притиснувши клейкі краї до поверхні місця накладення.
7. Після накладання пов'язки рекомендується нагріти її поверхню теплом руки для кращого прилипання.
8. Зазвичай пов'язка накладається на 3-4 дні. Змінювати пов'язку необхідно відповідно до клінічного стану рани, об'єму ексудату або за рекомендацією лікаря.
9. Тривалість використання пов'язки визначається лікарем.

Запобіжні заходи:

- Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.
- Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки.
- Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності.
- Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
- У разі виникнення алергічної реакції або подразнення — припинити використання та звернутися до лікаря.
- Розкрита упаковка, використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

Умови зберігання:

Зберігати в оригінальній упаковці, у недоступному для дітей місці, у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці. Не зберігати поруч із хімічно активними речовинами або джерелами вологи та джерелами тепла. Не потребує спеціальних умов транспортування.

Сторінка 1 з 2

Назва модифікації медичного виробу українською мовою
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 5 × 5 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 6 × 10 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 7,5 × 7,5 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 8 × 8 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 9 × 10 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 9 × 15 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 10 × 10 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 10 × 20 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 13,5 × 15 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 15 × 15 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 15 × 18 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 15 × 20 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 18 × 18 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 20 × 20 см
Пов'язка медична гідроколоїдна торгової марки IGAR 20 × 30 см



UA.TR.137

Виробник **Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"**
місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,
телефон/факс: +380445853455

Місце виробництва **Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд.,**
(Виробничі потужності) (Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.)
№ 1 Бейянь Род, Хесі Вілладж, Зуку Таун 213144 Чанчжоу Сіті, провінція
Цзянсу, Китайська Народна Республіка
(№ 1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town 213144 Changzhou City,
Jiangsu Province, People's Republic of China)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.



В.Г. Биков

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 30.01.2025р (Редакція 1)

Сторінка 2 з 2