



## ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДИЧНОГО ВИРОБУ Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR

**Форма випуску:** стерильна пов'язка в індивідуальному пакеті.

**Перед застосуванням медичного виробу обов'язкова консультація з лікарем!**

### **Опис виробу:**

Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR, стерильна - складається з трьох шарів:

- верхній шар – поліуретанова (ТПУ) плівка, що забезпечує паропроникність та захист від зовнішніх забруднень;
- середній шар – м'яка поліуретанова піна, яка поглинає та утримує ексудат;
- нижній шар – сітчастий шар із силіконовим адгезивом, що забезпечує м'яке фіксування без пошкодження шкіри під час зняття.

### **Показання до застосування:**

Використовувати за призначенням лікаря.

Виріб призначений для широкого спектру ексудуючих ран, включаючи післяопераційні шви, пролежні на початковій стадії, садна, опіків першого та другого ступеня та інших неінфікованих пошкоджень шкіри з помірним або слабким ексудатом.

### **Протипоказання:**

Не застосовувати при підвищеній чутливості до силікону.

Не використовувати у поєднанні з окислювачами, такими як перекис водню або розчин гіпохлориту.

Не використовувати на сухих некротичних тканинах без ексудату.

### **Спосіб застосування**

1. Виберіть правильний розмір: переконайтеся, що подушечка на рані виступає приблизно на 1-2 см за краї рани.
2. Перед використанням перевірити цілісність індивідуальної упаковки та термін придатності медичного виробу.
3. Ретельно вимити та висушити шкіру навколо рани, вимити руки та використати рукавички.
4. Відкрити упаковку безпосередньо перед застосуванням.
5. Зняти захисну плівку.
6. Не натягуючи та не торкаючись силіконового шару, накласти пов'язку силіконовим шаром до рани, обережно притиснувши клейкі краї до поверхні місця накладення.
7. За потреби можна зафіксувати пов'язку додатковим бинтом чи медичним пластиром.
8. Зазвичай пов'язка накладається на 3-4 дні. Змінювати пов'язку необхідно відповідно до клінічного стану рани, у разі насичення, забруднення або за рекомендацією лікаря.
9. Тривалість використання пов'язки визначається лікарем.

### **Запобіжні заходи:**

Зберігати у недоступному для дітей місці, уникати надмірно високих температур, надмірної вологості повітря та прямого сонячного світла.

- Не використовувати медичний виріб у разі пошкодження упаковки.
- Не використовувати медичний виріб повторно, лише для одноразового використання.
- Не використовувати медичний виріб після закінчення терміну придатності.
- У разі виникнення алергічної реакції або подразнення — припинити використання та звернутися до лікаря.
- Розкрита упаковка, використаний або невикористаний медичний виріб підлягають утилізації відповідно до вимог національних стандартів.

### **Умови зберігання:**

Зберігати в оригінальній упаковці, у недоступному для дітей місці, у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці. Не зберігати поруч із хімічно активними речовинами або джерелами вологи та джерелами тепла. Не потребує спеціальних умов транспортування.

Сторінка 1 з 2

| Назва модифікації медичного виробу українською мовою           |
|----------------------------------------------------------------|
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 5 × 5 см       |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 5 × 7 см       |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 5 × 20 см      |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 6 × 10 см      |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 6,5 × 6,5 см   |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 7,5 × 7,5 см   |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 8 × 8 см       |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 9 × 10 см      |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 9 × 15 см      |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 10 × 10 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 10 × 11 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 10 × 12 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 10 × 15 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 10 × 20 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 10 × 25 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 12 × 12 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 12,5 × 12,5 см |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 13 × 13 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 15 × 15 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 15 × 18 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 15 × 20 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 17,5 × 17,5 см |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 18 × 18 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 19 × 22,2 см   |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 20 × 20 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 20 × 30 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 21 × 21 см     |
| Пов'язка медична силіконова торгової марки IGAR 22,5 × 22,5 см |



UA.TR.137

Місце виробництва  
(Виробничі потужності)

Виробник Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР"

місцезнаходження: вул. Михайла Бойчука, 18-А, м. Київ, Україна, 01103,  
телефон/факс: +380445853455

**Чангжоу Мейджор Медікал Продактс Ко., Лтд.,**  
(Changzhou Major Medical Products Co., Ltd.)

№ 1 Бейянь Роад, Хесі Вілладж, Зуку Таун 213144 Чангжоу Сіті, провінція  
Цзянсу, Китайська Народна Республіка

(№ 1 Beiyang Road, Hexi Village, Zouqu Town 213144 Changzhou City,  
Jiangsu Province, People's Republic of China)

Медичний виріб відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753, про що видано Декларацію про відповідність.



**В.Г. Биков**

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 30.01.2025р (Редакція 1)

Сторінка 2 з 2